



# DETERGENTE NEUTRO BIODEGRADÁVEL PARA USO HOSPITALAR



# Atomic®

Detergente Neutro **DN-ULTRA III**

Detergente neutro concentrado com alto poder de limpeza e excelente ação desengordurante, proporcionando limpeza rápida e eficaz na remoção de matéria orgânica.



Ideal para limpeza de superfícies, de instrumental cirúrgico e de artigos odonto-médico-hospitalares



Não corrosivo



Biodegradável



\*Alto rendimento



# DETERGENTE NEUTRO

Para limpeza de superfícies, instrumentais cirúrgicos e artigos odonto-médico-hospitalares.

- ✓ ALTO PODER DE LIMPEZA
- ✓ AÇÃO DESENGORDURANTE
- ✓ TENSOATIVO NÃO IÔNICO
- ✓ NÃO CORROSIVO

Pode ser usado com segurança em inox, alumínio, aço cirúrgico, acrílico, polipropileno, polietileno, vidro e outras superfícies laváveis, não causando ressecamento em superfícies emborrachadas.

## Modo de uso

Preparar a solução de limpeza com o **ATOMIC DN-ULTRA**, com água a temperatura ambiente, conforme o grau de sujidade existente.

- **LIMPEZA PESADA:** 1 parte da solução para 3 partes de água (1:3);
- **LIMPEZA MÉDIA:** 1 parte da solução para 50 partes de água (1:50);
- **LIMPEZA LEVE:** 1 parte da solução para 100 partes de água (1:100).

