

Classe:DESCARTAVEL

Gerado em 29/08/2022 17:47:08

Modelo

Características

**COPEIV790 - CURATIVO FILME TRANSPARENTE
VERSÃO I. V. 7,0X9,0CM CX/50**

Finalidade:

Utilizado para fixação de cateteres intravenosos.

Impermeável a líquidos e bactérias, permeável a gases. Permite visualização da pele por baixo do curativo.

Nota: com elevada taxa de transmissão de vapor (MVTR).

Composição: Poliuretano, tecido não tecido 100% poliéster, adesivo acrílico, papel.

Modo de uso:

Preparo: preparar o local de acordo com o protocolo padrão da unidade de saúde.

Permita que todas as soluções utilizadas no preparo sequem completamente antes da aplicação do curativo.

A área a ser coberta pelo curativo deve estar completamente limpa e seca.

Aplicação do Curativo

1. Abrir a embalagem e retirar o curativo.
2. Remover a parte central do papel protetor (janela). As tiras adesivas ficarão nesta parte.
3. Retirar o papel do verso do curativo, expondo a superfície adesiva.
4. Posicionar o curativo com o adesivo para baixo e aplica-o sobre o local do cateter.
5. Remover a moldura/ auxiliar de aplicação ao mesmo tempo em que fixa as bordas do curativo.
6. Envolver totalmente a conexão do cateter com o curativo, de modo a selar com segurança o acesso ao ponto de inserção.
7. O usuário pode aplicar as tiras adesivas sob as asas ou suporte do cateter para proteger a pele, sobre as asas ou suporte para aumentar a estabilidade.
8. Para os curativos que vêm com uma etiqueta adesiva, anote as informações necessárias, remova-a da moldura, e aplique-a sobre o curativo.

Remoção do Curativo: Levante uma das bordas do curativo e remova-o lentamente, soltando-o da pele num ângulo de 180 graus. Suportar a pele e segurar o cateter enquanto remove o curativo. Para facilitar a remoção do curativo, pode-se utilizar um solvente de adesivo (vaselina líquida). Descartar em local próprio para materiais potencialmente contaminados.

Advertências:

Não utilizar caso a embalagem esteja violada.

O curativo deve ser utilizado imediatamente após a abertura da embalagem.

Produto de uso único. Descartar após o uso.

Proibido utilizar para substituir suturas ou outros métodos para cicatrização.

Trocar o curativo conforme o protocolo do hospital.

Precauções:

Em caso de irritação ou umidade na pele, descontinuar o uso.

A hemostasia deve ser observada antes de se aplicar o curativo.

A pele deve estar limpa e seca para assegurar uma boa adesão e cicatrização.

Contra Indicações:

Não utilizar sobre cateteres ou feridas infectadas.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Armazenar o produto à temperatura ambiente em sua embalagem original, em local seco, arejado e ao abrigo do sol.

DESCARTE

Descartar em local próprio para materiais potencialmente contaminados.

PRODUTO DE USO ÚNICO. DESCARTAR APÓS O USO
ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO

NOTA:

- Curativo Filme fenestrado.

- Produto Hipoalergênico.

Registro(s) MS: 10379860145,10379860234,10379860228



RESPONSÁVEL TÉCNICA:
Dra. Daniela Freitas Amorim
COREN-SP Nº 151479



SUPRINDO A SAÚDE DESDE 1977

ANVISA SOB N° 1.03798.6

Catálogo de Modelos



Classe:DESCARTAVEL

Gerado em29/08/2022 17:47:08

Pág. 2/2

Modelo

Características