

Classe:DESCARTAVEL

Gerado em 29/08/2022 17:48:33

Modelo

Características

**COPEL67 - CURATIVO FILME TRANSPARENTE
VERSÃO LISO 6X7CM CX/50**Um produto
da linha **COBERTINA®****RESPONSÁVEL TÉCNICA:**Dra. Daniela Freitas Amorim
COREN-SP Nº 151479

Finalidade:

Utilizado para fixação de cateteres intravenosos ou equipamentos, proteção de feridas e queimaduras na pele, prevenção de injúrias de pele causadas por atrito ou exposição contínua à umidade, proteção ocular durante procedimentos cirúrgicos e sobre feridas cirúrgicas limpas e fechadas.

Impermeável a líquidos e bactérias, permeável a gases. Permite visualização da pele por baixo do curativo.

Nota: com elevada taxa de transmissão de vapor (MVTR)

Composição:

Versão Liso: Poliuretano, adesivo acrílico, papel.

Modo de Uso:

Preparo: preparar o local para inserção do cateter ou curativo da ferida de acordo com o protocolo padrão da unidade de saúde.

A área a ser coberta pelo curativo deve estar completamente limpa e seca.

Versão Liso:

1. Abrir a embalagem e retirar o curativo.
2. Usuários dos modelos I.V.: remover a parte central do papel protetor (janela). As tiras adesivas ficarão nesta parte.
3. Retirar o papel do verso do curativo, expondo a superfície adesiva.
4. Posicionar o curativo sobre o local do cateter ou ferida.
5. Remover a moldura/ auxiliar de aplicação ao mesmo tempo em que fixa as bordas do curativo.
6. Usuários dos modelos I.V.: Envolver totalmente a conexão do cateter com o curativo, de modo a selar com segurança o acesso ao ponto de inserção.
7. Usuários dos modelos I.V.: o usuário pode aplicar as tiras adesivas sob as asas ou suporte do cateter para proteger a pele, sobre as asas ou suporte para aumentar a estabilidade.
8. Para os curativos que vêm com uma etiqueta adesiva, anote as informações necessárias, remova-a da moldura, e aplique-a sobre o curativo.

Remoção do Curativo: Levante uma das bordas do curativo e remova-o lentamente, soltando-o da pele num ângulo de 180 graus. Suportar a pele e segurar o cateter enquanto remove o curativo. Para facilitar a remoção do curativo, pode-se utilizar um solvente de adesivo (vaselina líquida).

Descartar em local próprio para materiais potencialmente contaminados.

Advertências:

Não utilizar caso a embalagem esteja violada.

O curativo deve ser utilizado imediatamente após a abertura da embalagem.

Produto de uso único. Descartar após o uso.

Proibido utilizar para substituir suturas ou outros métodos para cicatrização.

Trocar o curativo conforme o protocolo do hospital.

Precauções:

Em caso de irritação ou umidade na pele, descontinuar o uso.

A hemostasia deve ser observada antes de se aplicar o curativo.

A pele deve estar limpa e seca para assegurar uma boa adesão e cicatrização.

Contra Indicações

Não utilizar sobre cateteres centrais ou feridas infectadas.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

Armazenar o produto à temperatura ambiente em sua embalagem original, em local seco, arejado e ao abrigo do sol.

DESCARTE:

Descartar em local próprio para materiais potencialmente contaminados.

Nota: Produto Hipoalergênico.

PRODUTO DE USO ÚNICO. DESCARTAR APÓS O USO

ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO

Registro(s) MS: 10379860145,10379860231,10379860229



SUPRINDO A SAÚDE DESDE 1977

ANVISA SOB N° 1.03798.6

Catálogo de Modelos



Classe:DESCARTAVEL

Gerado em29/08/2022 17:48:33

Pág. 2/2

Modelo

Características