

Classe:DESCARTAVEL

Gerado em 19/10/2022 13:24:32

Modelo

Características

**COPER510 - CURATIVO FILME TRANSPARENTE
VERSÃO ROLO 5CMX10M**

Finalidade:

Utilizado para proteção de feridas e queimaduras na pele, prevenção de injúrias de pele causadas por atrito ou exposição contínua à umidade, proteção ocular durante procedimentos cirúrgicos e sobre feridas cirúrgicas limpas e fechadas.

Impermeável a líquidos e bactérias, permeável a gases. Permite visualização da pele por baixo do curativo.

Nota: com elevada taxa de transmissão de vapor (MVTR)

Composição:

Versão Rolo: Poliuretano, adesivo acrílico, papel.

Modo de Uso

Preparo: preparar o local para inserção do cateter ou curativo da ferida de acordo com o protocolo padrão da unidade de saúde.

A área a ser coberta pelo curativo deve estar completamente limpa e seca.

Versão Rolo:

1. Cortar o comprimento necessário do rolo com uma tesoura.
2. Retirar o papel do verso do curativo, expondo a superfície adesiva.
3. Posicionar o curativo sobre o local do cateter ou ferida.
4. Remover o auxiliar de aplicação ao mesmo tempo em que fixa as bordas do curativo.

Remoção do Curativo: Levante uma das bordas do curativo e remova-o lentamente, soltando-o da pele num ângulo de 180 graus. Suportar a pele e segurar o cateter enquanto remove o curativo.

Para facilitar a remoção do curativo, pode-se utilizar um solvente de adesivo (vaselina líquida).

Descartar em local próprio para materiais potencialmente contaminados.

Advertências:

Não utilizar caso a embalagem esteja violada.

O curativo deve ser utilizado imediatamente após a abertura da embalagem.

Produto de uso único. Descartar após o uso.

Proibido utilizar para substituir suturas ou outros métodos para cicatrização.

Trocar o curativo conforme o protocolo do hospital.

Precauções:

Em caso de irritação ou umidade na pele, descontinuar o uso.

A hemostasia deve ser observada antes de se aplicar o curativo.

A pele deve estar limpa e seca para assegurar uma boa adesão e cicatrização.

Contra Indicações

Não utilizar sobre cateteres ou feridas infectadas.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE: Armazenar o produto à temperatura ambiente em sua embalagem original, em local seco, arejado e ao abrigo do sol.

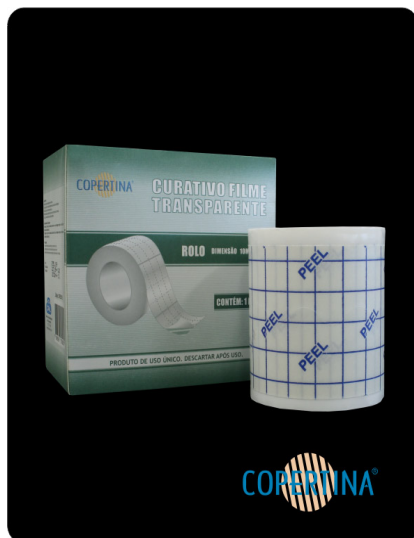
DESCARTE: Descartar em local próprio para materiais potencialmente contaminados.

Nota:

- Produto Hipoalergênico.
- Suporte quadriculado removível

PRODUTO DE USO ÚNICO. DESCARTAR APÓS O USO

Registro(s) MS: 10379860225,10379860233,10379860230

**RESPONSÁVEL TÉCNICA:**Dra. Daniela Freitas Amorim
COREN-SP Nº 151479



SUPRINDO A SAÚDE DESDE 1977

ANVISA SOB N° 1.03798.6

Catálogo de Modelos



Classe:DESCARTAVEL

Gerado em19/10/2022 13:24:32

Pág. 2/2

Modelo

Características